

Aperio GT 450 第 1.3.3 版



客户通知

1. 介绍

本客户通知旨在及时传达有关 Leica Biosystems 产品用户手册更新的信息。本客户通知包含有关您的 Leica Biosystems 产品的信息，这些信息亦将包含在产品未来一版或多版用户手册中。此信息可能包括新的说明内容、更新的规格或有关使用或保养产品的其他信息。请将本文档用作补充信息，直到修订的用户手册可用。

本客户通知提供有关使用 Aperio GT 450 第 1.3.3 版 版中提供的新功能的信息和说明。

本文档包含以下部分：

- 1.介绍
- 2.Aperio GT 450 第 1.3.3 版概述
- 3.在 SAM 中配置 金字塔缩小级别选项

受影响产品

Aperio GT 450扫描仪、扫描仪管理员软件和Aperio GT 450控制器版本1.3.3。

受影响的用户手册

本文档中包含的信息将在未来主要预定版本发布时纳入以下用户手册中：

文档名称	基本文档编号
Aperio GT 450 IT 管理员和实验室管理员指南	MAN-0394

2. Aperio GT 450 第 1.3.3 版概述


该Aperio GT 450版本1.3.3可让实验室管理员配置 GT 450 在生成的图像文件中包括多少金字塔级别。此选项可改善在一些第三方查看器中的用户查看体验。在以前的版本中，此选项需要 Leica 现场服务人员配置设置。

3. 在 SAM 中配置 金字塔缩小级别选项


只有分配实验室管理员角色的用户才可以进行配置更改。

要配置扫描仪的金字塔缩小级别设置，请按照以下步骤：

1. 登录 SAM software。
2. 当 SAM 主页出现时，确认选中横幅中的 **Scanners(扫描仪)** 图标，页面显示扫描仪列表。如果需要，单击 **Scanners(扫描仪)** 图标以显示列表。

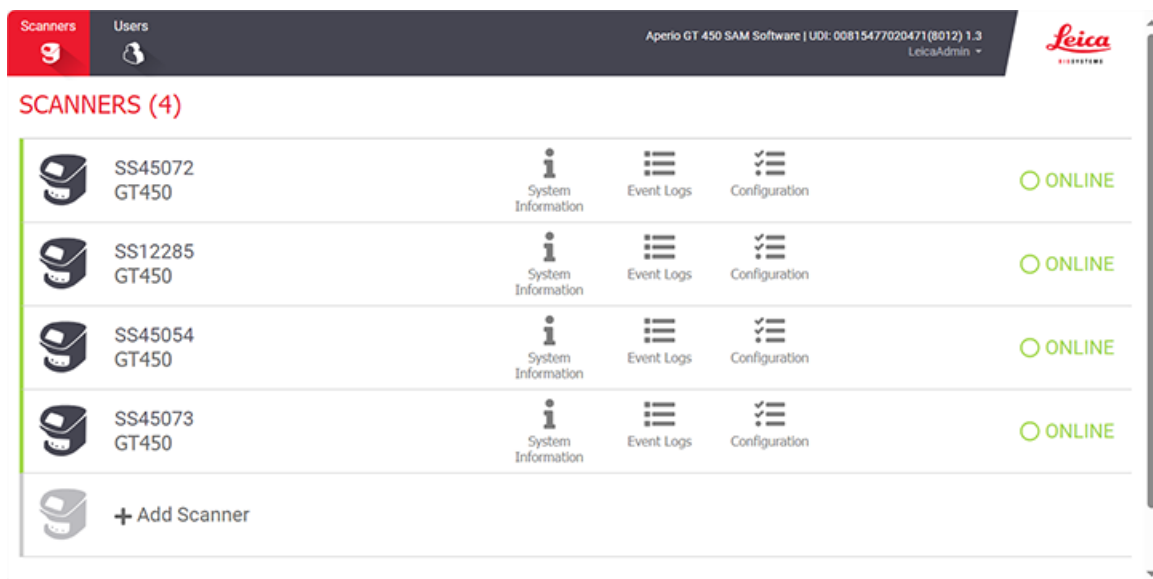

3. 单击相关扫描仪的 **Configuration(配置)** 图标。

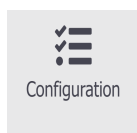

4. 在 **Images(图像)** 页面，单击 **Edit(编辑)**，然后滚动到页面底部。

- 在 PYRAMID LEVEL DOWNSCALING(金字塔缩小级别) 字段, 选择 2x 以启用 2 倍金字塔缩小级别选项。

The screenshot shows the configuration interface for the Leica Aperio GT 450 SAM Software. The top navigation bar includes 'Scanners' and 'Users' tabs, and the user is logged in as 'LeicaAdmin'. The main header displays 'SS45054 GT450' and navigation options for 'System Information', 'Event Logs', and 'Configuration'. The 'ONLINE' status is indicated. On the left, a sidebar menu lists various settings categories: Images, DSR, Event Handling, PIN Management, Backup & Restore, Message Debugger, Power Control, RTF Report, Time Zone, Test Utility, and Scan Settings. The main content area shows the 'PYRAMID LEVEL DOWNSCALING' setting, which is currently set to '2x' and is highlighted with an orange border. Other settings visible include 'BARCODE VALUE MODIFIER', 'BARCODE VALUE SUBSTITUTION FORMAT', 'IMAGE OUTPUT FORMAT' (set to 'SVS'), 'SLIDE ID FORMAT', 'CASE ID FORMAT', 'DIMENSION ORGANIZATION TYPE' (set to 'Full'), 'REQUIRE BARCODE ID' (disabled), and 'ALLOW MULTIPLE BARCODES' (disabled).

- 单击 **Save**(保存)。

注意

CN-0005-zh-CHS, A 版 | 八月 2024

最初说明。

版权声明

- 版权所有 © 2024 Leica Biosystems Imaging, Inc. 保留所有权利。LEICA 和 Leica 徽标是 Leica Microsystems IR GmbH 的注册商标。、GT 和 GT 450 是 Leica Biosystems Imaging, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标。其他标志、产品和/或企业名称可能是相关机构的商标。
- 本产品受注册专利保护。有关专利列表, 请联系 Leica Biosystems。

客户资源

- 获取 Leica Biosystems 产品和服务的最新信息, 请访问 [LeicaBiosystems.com/Aperio](https://www.leicabiosystems.com/Aperio)。

联系方式 – Leica Biosystems Imaging, Inc.

总部	客户支持
 <p>Leica Biosystems Imaging, Inc. 1360 Park Center Drive Vista, CA 92081 USA 电话: +1 (866) 478-4111(免费) 国际直线电话: +1 (760) 539-1100</p>	<p>联系您定本地支持代表, 来进行任何询问并提出任何服务请求。</p> <p>https://www.leicabiosystems.com/contact-us/</p>

仅用于研究目的。不用于诊断操作。



UDI 00815477020228, 00815477020471, 00815477020495

REF 23GT450, 23GT450SAMSW, 23GT450-R